

MELA

Стандартные автоклавы
с электронным управлением



Три новых стандартных автоклава

Новые автоклавы фирмы MELAG под торговой маркой MELA

MELAБольше безопасности

Достигаются ли и удерживаются ли необходимые параметры давления и температуры, являющиеся решающими для получения оптимального результата стерилизации, автоматически контролируется электроникой. Электроника указывает и на ошибки, возникающие во время хода программы, когда напр. превышена максимально допустимая норма загрузки автоклава, что в свою очередь влияет на удержание требуемой температуры.

Автоматический ход программы

После нажатия кнопки (включателя) "Wasserzulauf" (дозировка необходимого количества воды в камере автоклава) происходит выбор между «Мягкой программой» (1 bar=120°C), используемой для стерилизации текстильных материалов и резиновых изделий и «Нормальной программой» (2 bar=134°C), используемой для быстрой стерилизации инструментов. Включатель "Start" полностью автоматически запускает программу.

Качество – сделано в Германии

MELAG®
Evidence Based Sterilization

MELAtronic® 15 · MELAtronic®

Возможности управления

Доступна функция дополнительной сушки. Эта функция существенно сокращает время течения программы и даже при самых сложных задачах сушки поддерживает необходимую температуру (напр. большой объем загрузки, упакованные инструменты и т.п.). Кроме того, автоматически сокращается время нагревания и таким образом общее время работы.


Улучшенный выход воздуха

Стерилизация невозможна без действенного и эффективного выхода воздуха. При разработке концепции автоклавов MELAtronic® было значительно улучшено действие закона гравитации. Это означает не только большую безопасность, но и большую экономию времени и энергии.



Держатель пакетов – для оптимальной сушки

Сушка упакованных стерилизованных предметов может быть значительно улучшена благодаря использованию специального держателя пакетов (Арт №. 283). Если упаковки разложены на лотке, то в них образуются капельки воды. Но если упаковки стоят вертикально в держателе, конденсат быстро вытекает из них вниз. Благодаря этому сушка происходит эффективнее.

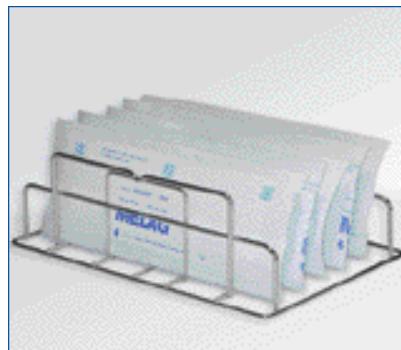

Технические параметры

Размеры

(глубина x ширина x высота в см)

MELAtronic® 15

MELAtronic® 17

MELAtronic® 23

Корпус:

46 x 41 x 34

51 x 45 x 36

55 x 51 x 38

Камера:

Ø 15 x 38, 7 л

Ø 18 x 42, 11 л

Ø 23 x 45, 19 л

Лоток:

35 x 12 x 2

40 x 14 x 2

42 x 19 x 2

Подключение к источнику питания:

230 Volt, 50 Hz, 1.200 Watt

230 Volt, 50 Hz, 1.310 Watt

230 Volt, 50 Hz, 2.000 Watt

Вес:

19 кг

22 кг

30 кг

Максимальный объем загрузки:

2 кг инструментов

3 кг инструментов

4 кг инструментов

150 гр текстильных
материалов

300 гр текстильных
материалов

500 гр текстильных
материалов

7 · MELAtronic® 23



- ① Крышка запасного резервуара с большим отверстием для легкой очистки и заполнения
- ② Подставка для лотков
- ③ Манометр для проверки давления
- ④ Включатель забора воды
- ⑤ Кнопка выбора программы
2 bar = 134°C (25 – 35 мин
продолжительность программы)
1 bar = 121°C (35 – 45 мин
продолжительность программы)
- ⑥ Кнопка старта программы
- ⑦ Сетевой выключатель
- ⑧ Электронное управление для контроля над ходом программы и установки функций предварительного нагревания/дополнительная сушка, с цифровым показателем температуры камеры
- ⑨ Стальная камера
- ⑩ Выходное отверстие для замены дистиллированной/деминерализованной воды

Резервуары для стерильного хранения инструментария

Если предметам необходимо длительное стерильное хранение, могут быть использованы специальные резервуары, которые в крышке и в днище имеют отверстия и в которых предусмотрены фильтрующие прокладки.



Варианты загрузки лотков или резервуаров:

MELAtronic® 15:

3 лотка
или 1 лоток и 1 контейнер 15M
или 1 лоток и 2 контейнера 15K
или 4 контейнера 15K
или 2 контейнера 15M
или 1 контейнер 15G

MELAtronic® 17

3 лотка
или 1 лоток и 1 контейнер 17M
или 1 лоток и 2 контейнера 17K
или 4 контейнера 17K
или 2 контейнера 17M
или 1 контейнер 17G
или 3 контейнера 17R

MELAtronic® 23

5 лотков
или 3 стандартных кассеты
или 1 лоток и 1 контейнер 23M
или 2 контейнера 23M
или 1 контейнер 23G
или 2 контейнера 23R
или 1 держатель пленки

Пятна

Для того, чтобы автоклав работал безупречно и долго использовать дистиллированной/деминерализованной воды является необходимым условием. Плохое качество воды является результатом образования пятен на инструментах. Поэтому рекомендуется, регулярно менять воду в запасном резервуаре, особенно когда загрязненность воды явно видна.



Упаковка MELAfol® поставляется в виде рулона или пакета.



MELAseal®
с держателем рулона "комфорт".



MELAdest®65

Преимущества

Небольшая цена за литр приготовленной воды с помощью установки MELAdest®65. Неизменно хорошее качество и никакой утилизации пустых канистр.

Более 50 лет назад в Берлине фирма MELAG начала специализироваться на производстве стерилизаторов. Стремление производить качественные продукты, серьёзность и положительный подход к инновациям сделали небольшое семейное предприятие основным и ведущим произ-

водителем стерилизаторов во всем мире. Более чем 345.000 приборов MELAG по всему миру являются доказательством этому. Многолетний опыт, современная, управляемая компьютерами техника, расположенная на площади более 7.000 м² завода в Берлине, использование высококачественных материалов и надёжный штат сотрудников делают приборы MELAG комфортабельными в обслуживании, качественными продуктами. Философия фирмы – последовательная специализация по ограниченной программе производства.



Стерильное хранение

С момента выгрузки инструментов из автоклава и до момента их последующего использования, необходимо обеспечить им стерильное хранение. Для этой цели фирма MELAG предлагает надежные и экономичные по цене продукты, такие как MELAfol® и MELAseal®.

MELAfol®

Действительно надежной защищённой от бактерий является запаивание инструментов в пленку MELAfol® - стерильная упаковка. Это упаковка сделана из бумаги и пленки. Она герметична на предмет проникновения бактерий, прочная и легко открывается.

MELAseal®

Упаковочная машина MELAseal® запаивает стерильные упаковки MELAseal®. Без всякого труда Вы получаете шов 10 мм шириной (согласно нормам DIN 58953 ширина шва должна быть не менее 8мм). Установка MELAseal® представлена в двух вариантах:

- MELAseal®100 "экономичная"
- MELAseal®101 "комфорт".

Благодаря чему фирма MELAG имеет возможность всегда поддерживать ассортимент выпускаемой продукции на рыночном и международном техническом уровне и совершенствоваться. Все сотрудники фирмы MELAG гордятся тем, что производя продукты для стерилизации и стерильного хранения вносят свой значительный вклад в защиту здоровья врачей и пациентов.

www.melag.com

MELAG®